

VIIRAL[®] CE

Viiral Næsespray - Indlægsseddel

Indledning

Læs indlægningssedlen nøje før du starter med at bruge Viiral næse spray. Gem indlægssedlen, så du kan læse den igen senere hvis nødvendigt.

Viiral næse spray er klassificeret som Medicinsk udstyr klasse 1.

Indhold

Indeholder Sinalin[™] neuraminacid, 1mg/ml opløst i isotonic (0,9%) saltvand (NaCl). Sinalin er en naturlig ingrediens i mange daglige fødevarer og forefindes i store mængder i menneskers brystmælk. Dermed er ingredienserne naturlige og kendte af kroppen.

Brug af Viiral næse spray

Bruges præventivt som forebyggelse imod smitte af forkølelses virus. Beskytter cellerne imod forkølelses virus, som man oftere udsættes for når man rejser, i perioder med mange vira i omløb, i større folkemængder. Hjælper desuden mod tørre slimhinder.

Hvordan virker Viiral næse spray

Øger slimhinderne i næstens indhold af naturligt Sinalin[™] neuraminacid. De fleste forkølelser forårsages af virusssmitte via de øvre slimhinder. Sinalin kan forebygge eller stoppe virus bakterier i næsens slimhinder. Dette gør det vanskeligt for virus partiklerne at fæstne sig i næsens slimhinder. Viiral fugter desuden næsens slimhinder og øger næsen helse.

Dosering – voksne og børn

Anbefalet dosering voksne og børn:

Børn 2-11 år: 1-2 sprøjt i hvert næsebor 2 gange dagligt

Børn fra 12 år og op samt voksne: 2 sprøjt i hvert næsebor 2 gange dagligt

Hvordan anvendes Viiral næsespray

Puds næse.

Tag hættten af spray flasken.

Før sprayen anvendes første gang, spray da to gange i luften for at aktivere pumpesystemet.

Placer toppen af flasken mellem fingrene og peg dem ind i hvert næsebor.

Pump to gange I hvert næsebor mens du trækker luften kraftigt ind med næsen

Set hættten tilbage på spray flasken.

Opbevar Viiral næse spray i rum temperatur ude af børns rækkevidde.

Viiral næse spray er et personligt produkt og bør ikke deles med andre.

Hvis børn anvender næsespray, anbefales det at en voksen sikrer korrekt brug og dosering.

Hvis Viiral anvendes til babyer, skal en voksen sikre korrekt brug og dosering.

viiral[®]



BROPHARMA
CURED BY NATURE